

百特 | 腹透培训



课程 4.



导管及出口处的护理

Baxter

百特 肾科

课程 4.


什么是腹透管？它有什么作用？
什么是出口处和皮下隧道？

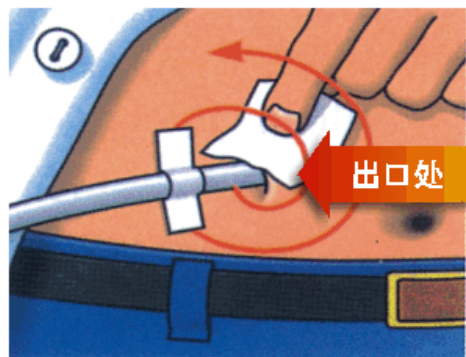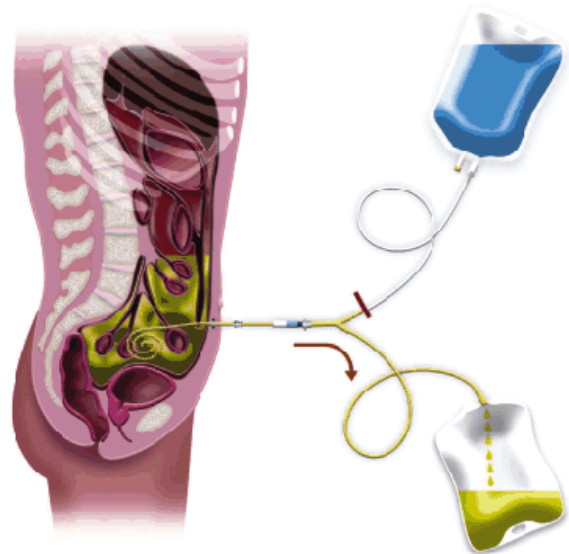

腹透管是您的生命线
出口处护理至关重要

什么是腹透管？它有什么作用？
什么是出口处和皮下隧道？

- 腹透管是腹透液进出腹腔的通道
- 开始透析前，医生会在你的腹部做一个小手术，把腹透管的一端插在腹腔里，另一端留在腹腔外

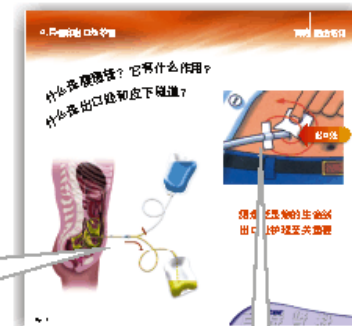


“出口处”是指腹透管从皮肤上出来的地方。
“皮下隧道”是腹透管在腹壁里经过的一个通道。

腹透导管出口处感染和隧道感染都会引起腹膜炎
如果没有好好地护理出口处，皮肤上的细菌可能通过隧道进入到腹腔里，引起隧道感染和/或腹膜炎。

在不同的阶段，出口处护理的方法不同

- 早期出口处护理：术后<6周
确保切口正常愈合
- 长期出口处护理：术后>6周，愈合良好
预防感染

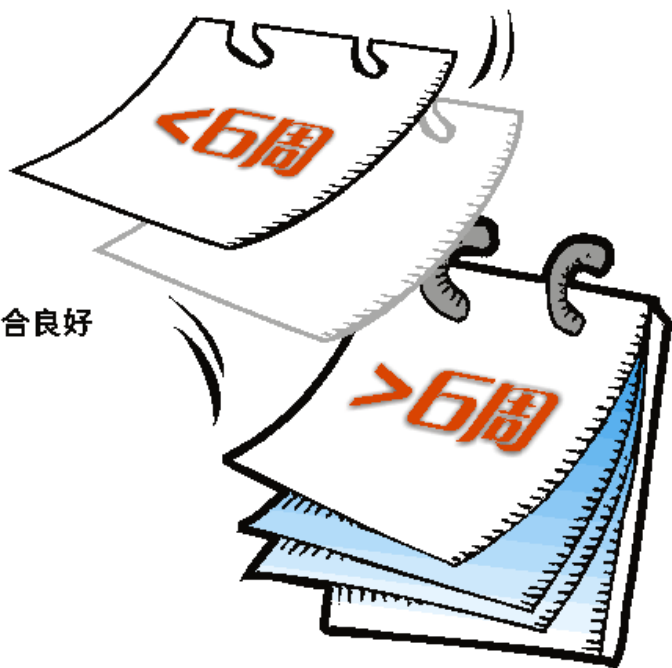

在不同的阶段，出口处护理的方法不同

早期出口处护理(<6周)


确保切口正常愈合

1. 最好由专业医生/护士进行。
2. 换药次数不用太频繁。
3. 一定要保证无菌。
4. 一定要把导管固定好。
5. 2周内不能洗澡。
6. 有渗血、渗液立即报告。

长期出口处护理(>6周)

预防感染

1. “培训后上岗”。
2. 必须按照护士教你的标准进行操作。
3. 一定要把导管固定好。
4. 发现可疑的感染，一定立即报告。

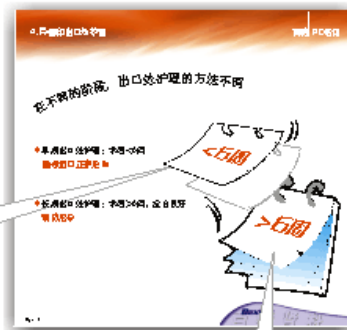

洗澡


- 手术后2周内不要洗澡
- 2~6周内可以在洗澡袋的保护下进行淋浴
- 6周以后，如愈合良好，可以在无保护下淋浴



**注意：洗澡时不能盆浴，
不能把出口处浸泡在水里！**

洗澡

- 1、脱掉衣服，取下出口处纱布，保持腹透管和连接短管固定在原处；
- 2、检查出口处，有没有感染；
- 3、2-6周内，贴好洗澡保护袋，淋浴；
- 4、轻擦保护袋周围皮肤；
- 5、彻底冲洗；
- 6、干净毛巾擦干全身；
- 7、纱布或棉签沾清洁剂擦洗出口处周围；
- 8、若有异常及时报告医生。

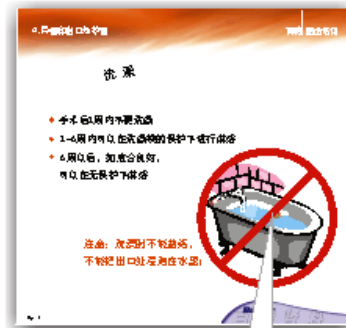


注意：

1. 洗澡时不能盆浴，不能把出口处浸泡在水里！
2. 你的淋浴液或抗菌皂最好不与家人混用，避免交叉感染。

导管和出口处护理的5个基本原则：

- 1、接触导管之前，一定要洗手。
- 2、时刻将导管固定在皮肤上。
- 3、不要拉扯、扭转或压迫你的导管。
- 4、绝对不可在导管周围使用剪刀。
- 5、绝对按照标准的方法来进行导管和出口处的护理。

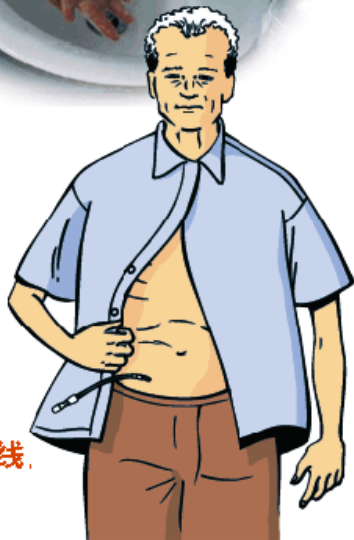

腹透管是您的生命线，
一定要好好保护！



Baxter

导管和出口处护理的5个基本原则：

1、接触导管之前，一定要洗手。

检查您的导管和外接短管：他们必须没有裂纹，裂口，微小的洞。

- 确保导管/外接短管连接紧密
- 每3-6个月更换一次您的外接短管或根据医生的要求

2、时刻将导管固定在皮肤上。

3、不要拉扯、扭转或压迫你的导管。

4、绝对不可在导管周围使用剪刀。

5、绝对按照标准的方法来进行导管和出口处的护理。

- 早期出口处护理指南
- 长期出口处护理指南

