

百特 | 腹透培训



课程 7.

透析液与相关物品的订购和储存


Baxter

百特 肾科

课程 7.


第一次订货，我该订购什么？

- 百特双联®双袋腹透液，每日3-5袋，每月90-150袋
- 碘液微型盖，每日3-5个，每月90-150个
- 恒温暖液袋/恒温箱

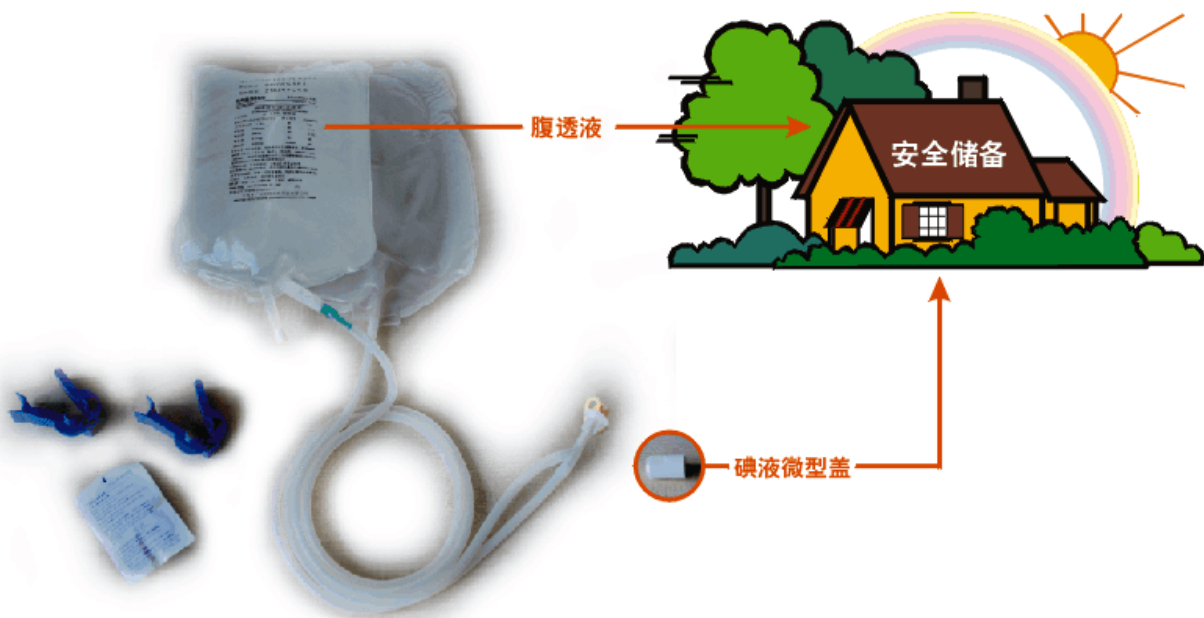

第一次订货

- 出院前，医生将给你开一份处方，你可以在医院拿到1-2个月的透析液和配件（腹透液，碘液微型盖），以及出口处换药所需的物品（无菌纱布，不含酒精的碘液，无菌棉签，胶带）
- 如果你准备每个月取一次透析液，那么第一次订购的透析液用量应该比一个月的实际用量多出至少**7天**，而且以后每次都要在家里还有至少**7天**的用量的时候就订货，这些留用的透析液就叫做“**安全储备**”
- 每个月到医院做定期检查时，医护人员会与你共同讨论目前的治疗状况，并开出下个月所需使用的透析液处方
- 你可以与医生协商，根据你的具体情况，从医院或直接从代理商那里取药
- 百特公司代理商正在全国各地陆续开展免费送货上门的业务

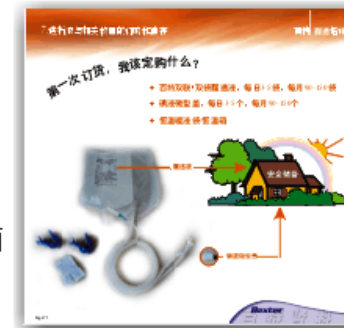

透析液应该如何保存?

- 存放在干净、通风、干燥的地方，室温存放
- 避免阳光直接照射
- 尽可能将透析液集中放置，并将有效期较近的放置在最上面或前面，以便先行使用
- 开箱后的透析液放置于原包装箱内，并及时处理用完的空纸箱



透析液应该如何保存?

- 存放在干净、通风、干燥的地方，室温存放
- 避免阳光直接照射
- 尽可能将透析液集中放置，并将有效期较近的放置在最上面或前面，以便先行使用
- 开箱后的透析液放置于原包装箱内，并及时处理用完的空纸箱



物品有问题怎么办?

**如果打开包装后发现腹透液或配件有杂质、
破损或怀疑有质量问题时:**


- 请将该物品保留
- 立即与医院、送货人员或百特公司联系
- 经确认后，将在下一次送货时作更换



物品有问题怎么办?

**如果打开包装后发现腹透液或配件有杂质、
破损或怀疑有质量问题时:**

- 请将该物品保留
- 立即与医院、送货人员或百特公司联系
- 经确认后，将在下一次送货时作更换

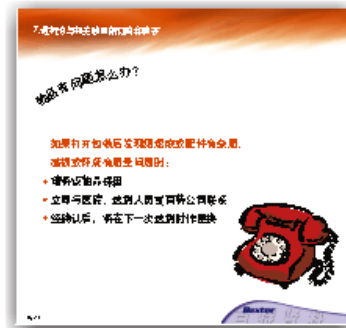

我要旅行怎么办？

• 国际旅行

• 国内旅行



国际旅行及腹透自由行



国际旅行

- 出行前2月通知住地经销商或百特工作人员
- 办妥本地和异地购药手续
- 提供详细信息
 - 送货详细地址（旅馆或住所）
 - 当地联系人姓名及电话号码
 - 外出旅行时间及抵达目的地时间
 - 付费凭证

国内旅行

- 出行前1月通知住地经销商或百特工作人员
- 办妥本地和异地购药手续
- 提供详细信息
 - 送货详细地址（旅馆或住所）
 - 当地联系人姓名及电话号码
 - 外出旅行时间及抵达目的地时间
 - 付费凭证

具体咨询百特腹透关爱热线：

021-54075071